

Homeopatsko (Alkohol)	1:10dili kucija	Mupirocin	12 mg/ml
Prisilo za grlo	16% v/v	Fisherman's friend	1,3 mg/ml
Tobramicin	5 ug/ml	Zicam	4%v/v

4. Omejevanje zaznavanja (analitična občutljivost)

LoD za SARS-CoV-2 Antigen hitro testiranje komplet je 1,6 x 10⁴TCID₅₀/ml.

LoD za testni komplet SARS-CoV-2 je bil določen z uporabo redčenja inaktiviranega virusa z gama-zarko.

[OPOZORILA]

- Negativen rezultat se lahko pojavi, če je virus SARS-CoV-2 v vzorcu pod občutljivostjo testnega kompleta.
- Ne uporabljajte za presejanje krvi.
- Ne kadite, pijte ali jejte v območju testiranja.
- Održite vse vzorce in materiale, ki se uporabljajo za izvedbo testa, kot nevarne biološke odpadke.
- Ne testirajte na območju z močnim pretokom zraka, to je električnim ventilatorjem ali močno klimatsko napravo.

[RAZLAGA OZNAKE]

	In vitro diagnostična uporaba		Glejte navodila za uporabo		Katalogska številka
	Številka serije		Datum izteka roka uporabnosti		Datum proizvodnje
	Ponovna uporaba prepovedana		Shranjujte med 2-30°C		Hranite stran od sončne svetlobe
	Hranite na suhem		Proizvajalec		Pooblaščen predstavnik v EU
	Oznaka CE		Biološka nevarnost		

[OSNOVNE INFORMACIJE]

JOYSBIO(Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.

Naslov: Tianjin International Joint Academy of Biotechnology&Medicine, 9th floor No.220, Dongting Road, TEDA 300457 Tianjin, Kitajska

Tel: +86-022-65378415

Lotus NL B.V.

Naslov: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, Haag, Nizozemska.

[DATUM ODOBRITEV IN SPREMEMBE NAVODIL ZA UPORABO]

Januar-2021

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

je na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje, izredno odobren za samotestiranje, za izvajanje posebnega presejalnega programa.

V primeru dodatnih vprašanj ali neželene dogodkov, se obrnite na NIJZ, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, info@nijz.si.

Datum proizvodnje: 20210104

Številka serije: 2021010501


Rok uporabnosti: 20230103

Izredno odobreno za samotestiranje, za izvajanje posebnega presejalnega programa.



NAVODILA ZA SAMOTESTIRANJE

6 KORAKIH

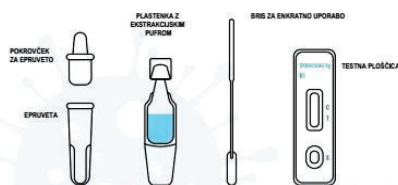

Za dodatne informacije se lahko obrneš na telefonsko številko Ministrstva za zdravje: **01/478 68 48** vsak delavnik med 8:30 in 15:30

NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD

PREDEN SE BOŠ SAMOTESTIRAL, SI TEMELJITO UMIJ ROKE IN OČISTI POVRŠINO MIZE. PRIBOR PO UPORABI ZAPRI V PLASTIČNO VREČKO. PO TREH DNEH JO ODVRZI MED MEŠANE ODPADKE.

1

Pripravi celoten komplet:

- epruveto,
- pokrovček za epruveto,
- malo plastenko z ekstrakcijskim puфом,
- bris za enkratno uporabo in testno ploščico.

Testno ploščico izvleci iz embalaže in jo položi na ravno površino.

2

ODSTRANI EKSTRAKCIJSKI PUFER

Odstrani pokrovček na plastenki in ekstrakcijski pufer prelij v epruveto

3

V eni roki drži epruveto, z drugo roko si odvzemi bris.

- Bris potisni približno 2,5 cm globoko v nosnico.
- Z brisom 5 krat zaokroži in nežno podrgni po sluznici.
- Enako ponovi v drugi nosnici.

POZITIVEN REZULTAT?
POTREBNA JE SAMODIAGNOSTIČNA
NE DRUŽBA Z LJUDMI.
STARIŠKAJE PRITVOŽBO ZDRAVNIŠKO NAROČILO NA PCR TESTIRANJE

4

20 sek.

Vstavi bris v epruveto z ekstrakcijskim puфом in z njim 20 sekund mešaj. Zavrti ga vsaj 5 krat. Bris ob odstranjevanju stisni med notranjost epruvete.

5

Zaprte epruveto s pokrovčkom s tulcem navzgor. Zaprite epruveto dobro premešaj. Iz epruvete previdno nakapljaj 3 kapljice v manjšo odprtino na testni ploščici.

6

Počakaj 15 minut

Rezultat je tu:

NEGATIVEN
POZITIVEN
NEVELJAVEN - FONDI TEST

NEGATIVEN REZULTAT?
LJARKO NE VRNINE V ŠALO.
SE NAMREJ UPORABEVAJI UDELEŽE ZA PREPREČEVANJE
ŠKODLJIVOSTI

NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje

Samotestiranje se lahko izvaja samostojno od dopolnjenega 12. leta.